

ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА



Мазок из носоглотки



Мазок из ротоглотки




ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(2 варианта комплектации набора)


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1

буфер разливается в индивидуальные пробирки-капельницы для пробоподготовки

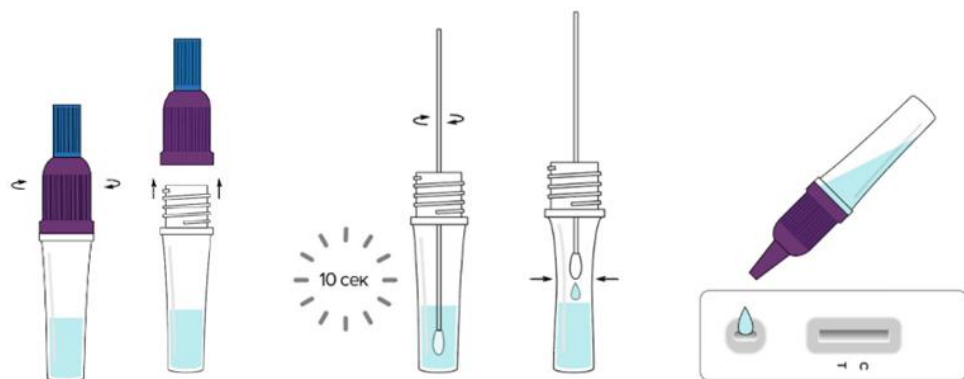

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 2

буфер разлит в 2 отдельных флакона; в комплект пробирок для пробоподготовки входит отдельная насадка-капельница

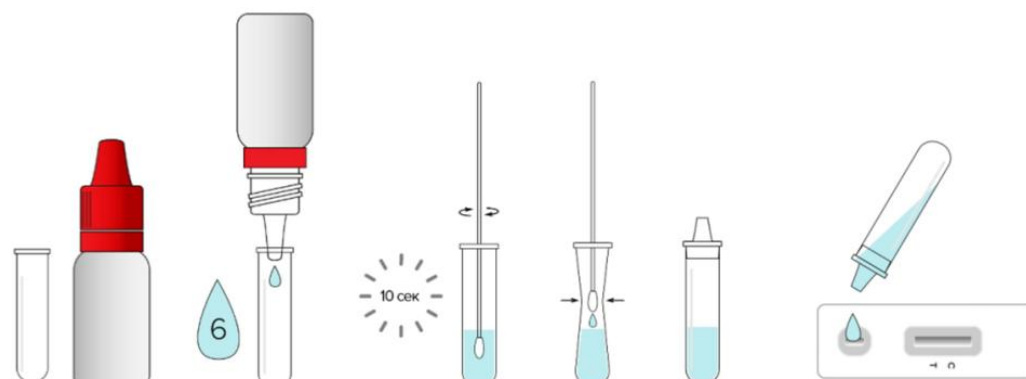

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

НЕДОСТОВЕРНЫЙ



положительный результат теста означает, что в исследуемом биоматериале обнаружен антиген SARS-CoV-2, что является основанием для постановки положительного диагноза COVID-19



отрицательный результат означает, что антиген SARS-CoV-2 отсутствует или его концентрация в исследуемом биоматериале ниже границы чувствительности метода