



Тестирование

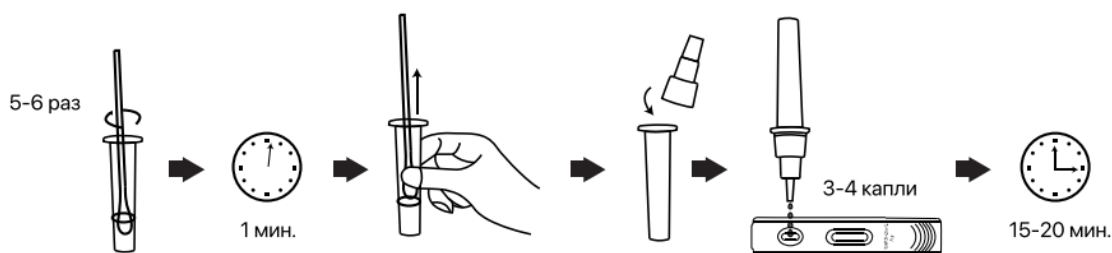

- 1 Поместите 0,1 мл (3-4 капли) раствора из экстракционной пробирки в центр углубления для образца на поверхности тестовой кассеты; считайте результат тестирования через 15 минут (не интерпретировать полученный результат через 20 минут после тестирования).
- 2 Если для обработки образца используется раствор образца вируса, тестирование проводят без применения разбавителя.

Интерпретация результата тестирования

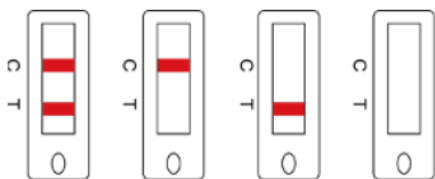

Положительный результат: +

окрашивание контрольной линии (С) и линии тестирования (Т) указывает на положительный результат на наличие антигена к коронавирусу SARS-CoV-2.

Отрицательный результат: -

окрашивание только контрольной линии (С) без окрашивания линии тестирования (Т) указывает на отрицательный результат на наличие антигена к коронавирусу SARS-CoV-2.

Недействительный результат:

при отсутствии линии контроля (С) после проведения тестирования результат считается недействительным. Рекомендуется выполнить повторный анализ, поскольку данный результат может говорить о нарушении процедуры проведения анализа или негодности используемой тестовой кассеты. В этом случае внимательно прочтите инструкцию по применению и выполните повторный анализ с использованием новой тестовой кассеты.